

## **ТЕСТ-смужки АККУ-ЧЕК АКТИВ №50**

**Комплектація:** упаковка тест смужок 50 шт.

**Виробник:** ROCHE/ШВЕЙЦАРІЯ

**Торгова марка:** АККУ-ЧЕК

**Спосіб застосування:** Кожен набір тест-смужок забезпечений докладною інструкцією. Процедура проведення аналізу крові на цукор достатня проста. Спочатку ретельно вимийте руки з милом і протріть палець спиртом. Потім спеціальною медичною голкою зробіть швидкий укол в бічну поверхню кінчика середнього пальця. Видавть з рани першу краплю крові, приберіть її сухою ваткою. Другу крапельку крові нанесіть на край тест смужки.

Через зазначений в інструкції час промокніть залишки крові з тест-смужки ваткою і порівняйте колір смужки з колірною шкалою на флакончику тест-смужки. Кожен відтінок на колірній шкалі відповідає певному показнику вмісту глюкози в крові. Наведіть край тест-смужки з нанесеною кров'ю уздовж шкали і знайдіть таке місце, забарвлення якого найбільш точно відповідає кольору цієї тест-смужки. Яке число стоїть поряд з цією ділянкою шкали, таке і є приблизне вміст цукру у вашій крові

**Термін придатності:** Вказаний на упаковці