

ГЛЮКОМЕТР RIGHTEST GM 550

Комплектація: Ланцетний пристрій Rightest GD 500
одноразові стерильні ланцети - 10 шт.
тест-смужки Bionime Rightest GM 550 - 10 шт.
інструкція по використанню ланцетного пристрою
інструкція із застосування тест-смужок Rightest GS550
щоденник обліку вимірювань
гарантійний талон + візитка для екстрених випадків
футляр

Виробник: Швейцарія

Торгова марка: RIGHTEST

Спосіб застосування: Перевірте глюкометр перед тим, як його використовувати
Це можна перевірити за допомогою готових тест-смужок або рідини, яка розміщується на тест-смужку. Вищезазначені елементи поміщаються в апарат, а результати повинно бути в межах допустимого.
Ретельно мийте руки, в тому числі ділянку, з якої Ви плануєте брати кров.
Простерилизуйте ватний тампон
Помістіть тест-смужку в отвір у глюкометрі.
Протріть тампоном ділянку, з якої Ви плануєте брати зразок
Спирт швидко випаровується, так що немає необхідності висушувати оброблювану ділянку.
Зачекайте, поки глюкометр дасть Вам знак нанести краплю на тест-смужку
На дисплеї фактично може з'явитися напис «Помістіть зразок на смужку» або може з'явитися значок краплі
Використовуйте ланцет, який додається до глюкометру, і уколить вибрану Вами ділянку
Помістіть краплю крові на тест-смужку
Нові типи смужок надають ефект "вбирання", за допомогою якого тест-смужка вбере кров. У глюкометра старого типу буде потрібно фактичне падіння крові на смужку.
У більшості випадків глюкометри не вимагають більше, ніж одну краплю крові для процедури.
Зачекайте, поки з'являться результати
Глюкоіметр почне відраховувати час у секундах відразу ж після того, як зразок потрапить на тест-смужку, а глюкометр це зафіксує. Прочитайте і запишіть Ваші результати

Термін придатності: необмежений