

## **ТЕСТ-смужки WELLION CALLA №50**

**Комплектація:** упаковка тест смужок 50 шт.

**Виробник:** Мед Траст Австрія

**Торгова марка:** WELLION CALLA

**Спосіб застосування:** Кожен набір тест-смужок забезпечений докладною інструкцією. Процедура проведення аналізу крові на цукор достатня проста. Спочатку ретельно вимийте руки з милом і протріть палець спиртом. Потім спеціальною медичною голкою зробіть швидкий укол в бічну поверхню кінчика середнього пальця. Видавіть з рани першу краплю крові, приберіть її сухою ваткою. Другу крапельку крові нанесіть на край тест смужки. Після чого внесіть тест-смужку у глюкометр і потім зчитайте результати.

**Термін придатності:** Вказаний на упаковці