

ТЕСТ-смужки LONGEVITA №50 (25x2)

Комплектація: упаковка тест смужок 50 шт. 2 тубуси по 25.

Виробник: Вісгеніер Інк., Китай

Торгова марка: Longevita

Спосіб застосування: Кожен набір тест-смужок забезпечений докладною інструкцією. Процедура проведення аналізу крові на цукор достатня проста. Спочатку ретельно вимийте руки з милом і протріть палець спиртом. Потім спеціальною медичною голкою зробіть швидкий укол в бічну поверхню кінчика середнього пальця. Видавіть з рани першу краплю крові, приберіть її сухою ваткою. Другу крапельку крові нанесіть на край тест смужки. Після чого внесіть тест-смужку у глюкометр і потім зчитайте результати.

Термін придатності: Вказаний на упаковці