

ТОНОМЕТР елект. авт. VA-350

Комплектація: вимірювач тиску автоматичний VEGA VA-350
манжета 22-42 см
гарантійні документи;
Інструкція
сумка для зберігання прибору

Виробник: ТІВОЛІ ГРУПП ЛІМІТЕД, КИТАЙ

Торгова марка: VEGA

Спосіб застосування: Браслет тонометра необхідно ретельно закріпити на зап'ясті дисплеєм вгору, розмістивши таким чином, щоб між підставою долоні і нижнім краєм браслета залишалася відстань в 0,5-1 см.

Браслет тонометра повинен повністю закривати зап'ястя.

Для гарантії точності вимірювання необхідно переконатися, що браслет ретельно закріплений.

При вимірі тиску необхідно прийняти зручну позу.

Перш, ніж вимірювати тиск, необхідно зробити 5-6 глибоких зітхань, а потім відновити нормальне дихання.

Дуже важливо при вимірюванні тиску не напружувати м'язи і зберігати зручну позу.

Після виконання даних умов можна приступати до нігнітання повітря та вимірювання тиску, це відбувається в повністю автоматизованому режимі.

Термін придатності: необмежений