

ГЛЮКОМЕТР FINETEST AVTO-CODING PREMIUM

Комплектація: Глюкометр «Файнтест Аутокодінг Преміум»

тест-смужки Файнтест - 25 шт.

пристрій для проколу

ланцети - 25 шт.

керівництво по експлуатації російською мовою

гарантійна картка на весь термін експлуатації

батарея

футляр

Виробник: INFOPIA CO.LTD КОРЕЯ

Торгова марка: FINETEST

Спосіб застосування: Перевірте глюкометр перед тим, як його використовувати

Це можна перевірити за допомогою готових тест-смужок або рідини, яка розміщується на тест-смужку. Вищезазначені елементи поміщаються в апарат, а результати повинно бути в межах допустимого.

Ретельно мийте руки, в тому числі ділянку, з якої Ви плануєте брати кров.

Простерилизуйте ватний тампон

Помістіть тест-смужку в отвір у глюкометрі.

Протріть тампоном ділянку, з якої Ви плануєте брати зразок

Спирт швидко випаровується, так що немає необхідності висушувати оброблювану ділянку.

Зачекайте, поки глюкометр дасть Вам знак нанести краплю на тест-смужку

На дисплеї фактично може з'явитися напис «Помістіть зразок на смужку» або може з'явитися значок краплі

Використовуйте ланцет, який додається до глюкометру, і уколить вибрану Вами ділянку

Помістіть краплю крові на тест-смужку

Нові типи смужок надають ефект "вбирання", за допомогою якого тест-смужка вбере кров. У глюкометра старого типу буде потрібно фактичне падіння крові на смужку.

У більшості випадків глюкометри не вимагають більше, ніж одну краплю крові для процедури.

Зачекайте, поки з'являться результати

Глюкометр почне відраховувати час у секундах відразу ж після того, як зразок потрапить на тест-смужку, а глюкометр це зафіксує. Прочитайте і запишіть Ваші результати

Термін придатності: необмежений